

Aufstehsessel Salamanca

Benutzerhandbuch

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben einen Aufstehsessel von Devita erworben und wir danken Ihnen für Ihre Wahl und das Vertrauen das Sie unserem Produkt schenken. Alle unsere Sessel werden in Oberthal/Saar, Deutschland hergestellt.

Wir haben alle Komponenten mit größter Sorgfalt und hoher Qualität ausgewählt, um Ihnen einen Sessel ohne besondere Pflege mit größtmöglicher Zufriedenheit bei der Benutzung gewährleisten zu können. Wir wünschen Ihnen viele Jahre vom Komfort und den Funktionen des Aufstehsessels Salamanca zu profitieren.

Nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch durchzulesen, um sich mit Ihrem Sessel und dessen Gebrauch vertraut zu machen. Für alle weiteren Informationen kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, bei dem Sie den Sessel gekauft haben.

SICHERHEIT: Der Aufstehsessel Salamanca soll Ihnen helfen, sicher aufzustehen. Kinder sollten den Sessel nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Wenn Sie den Sessel nicht benutzen muss der Sessel in Sitzposition bleiben.

Wir danken Ihnen noch einmal, dass Sie sich für einen Sessel von Devita entschieden haben.

Herzlichst

Ihr Devita - Team



Sicherheitshinweise

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch und / oder auf dem Sessel verwendet, um Warnungen und wichtige Sicherheitsinformationen zu kennzeichnen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Informationen vertraut.



- **ACHTUNG!** Informiert Sie über gefährliche Situationen, die zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden. Dieses Symbol wird mit einem Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck dargestellt.



- **OBLIGATORISCH!** Die Nichtbeachtung einer vorgeschriebenen Anweisung kann zu Verletzungen und / oder Schäden am Sessel führen. Dieses Symbol wird durch ein weißes Ausrufezeichen in einen blauen Kreis dargestellt.



- **VERBOTEN!** Dieses Zeichen kennzeichnet Aktionen, die unter keinen Umständen ausgeführt werden dürfen. Bei Nichtbeachtung verbotener Aktionen kann es zu Verletzungen und/oder Schäden am Sessel kommen. Dieses Symbol wird durch einen Schrägstrich in einem roten Kreis dargestellt.

Sicherheitssymbole

- Die folgenden Symbole kennzeichnen Warnungen, obligatorische Anweisungen oder verbotene Handlungen. Sie befinden sich in diesem Handbuch und/oder auf dem Sessel. Vergewissern Sie sich dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie den Sessel benutzen.



LESEN SIE DIESES HANDBUCH
SORGFÄLTIG



RISIKO FÜR KINDER



GEFAHR DES EINKLEMMENS ODER
QUETSCHENS



RISIKO FÜR HAUSTIERE



QUETSCHGEFAHR DES TRAFOS
TRANSFORMATORS



STURZ/FALL-RISIKO



BRANDGEFAHR



KIPPGEFAHR FÜR KINDER UND
HAUSTIERE



NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN



NICHT RAUCHEN



ÜBERSPANNUNGS-RISIKO



NICHT IM HAUSMÜLL ENTSORGEN

**OBLIGATORISCH**

- Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie den Sessel zusammenbauen und verwenden.
- Ihr Sessel wurde mit grosser Sorgfalt entwickelt und hergesetzt, unsere Produkte zeichnen sich durch maximale Unterstützung des Nutzers und langjährige Zuverlässigkeit aus. Unsere Produkte dienen Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit nachhaltig. Wir prüfen und testen jeden Sessel vor dem Versand.

Achtung!

			• Sie werden gebeten, Ihren Sessel mit großer Sorgfalt für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen zu benutzen. Die folgenden Anweisungen sind die Grundsätze für die sichere Verwendung des Sessels.
			• Packen Sie den Sessel mit größter Sorgfalt aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Halten Sie Kleinkinder von Verpackungsteilen aus Folie oder Kunststoff fern, wegen der bestehenden Erstickungsgefahr.
			• Lassen Sie keine kleinen Kinder oder Haustiere in die Nähe des Sessels kommen, während Sie diesen benutzen.
			• Die Fernbedienung muss für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahrt werden, wenn der Sessel nicht benutzt wird.
			• Wenn Sie sich hinsetzen, lassen Sie sich niemals in den Sessel fallen. Das kann Ihren Aufstehsessel beschädigen oder Sie könnten sich verletzen.
			• Lassen Sie niemanden auf Ihren Schoß, auf der Beinstütze oder auf den Armlehnen des Sessels sitzen. Der Sessel könnte umkippen und Sie und/oder den Sessel beschädigen oder verletzen.
			• Halten Sie niemals Ihre Finger oder Hände zwischen den Sitz und die Armlehnen wenn der Sessel benutzt wird und an das Stromnetz angeschlossen ist.
			• Versuchen Sie nicht, einen Gegenstand aus dem Inneren oder unter dem Stuhl herauszuholen, bevor Sie den Stuhl von der Stromversorgung getrennt haben.
			• Benutzen Sie den Aufstehsessel nicht, wenn sich eine Person, ein Haustier oder ein anderer Gegenstand, der den Betrieb des Sessels beeinträchtigen könnte, unter oder vor der Beinstütze und unter oder hinter dem Sessel befindet.
			• Stellen Sie sicher das kein Kind oder Haustier vor, unter oder hinter den Sessel steht, wenn die Rückenlehne geneigt ist oder wird. Der Sessel kann umkippen.
			• Rauchen Sie nicht, während Sie den Sessel benutzen, egal ob Sie sitzen oder liegen.
			• Tauchen Sie keine elektrischen Komponenten des Sessels in Flüssigkeiten, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Sprühen Sie keine Flüssigkeit auf die elektrischen Komponenten. Öffnen Sie niemals selbst elektrische Komponenten.
			• Die Garantie für die elektrischen Komponenten erlischt, wenn diese nicht von einer von Medtrade autorisierten Person geöffnet wird.

			Stellen Sie sicher, dass der Sessel in einem sicheren Abstand von der Wand (oder einem anderen Hindernis) steht, damit der Aufstehsessel sicher benutzt werden kann. Der einzuhaltende Abstand ist für jeden Sessel spezifisch. Es wird Ihnen zusammen mit unserem Sesselkatalog ausgehändigt. Andernfalls kann der Sessel beschädigt werden und die Garantie erlischt.
			Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um Ihren Sessel anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass Ihre anderen elektrischen Geräte (z. B. elektrische Heizung ...) und deren elektrische Anschlüsse einen ausreichenden Abstand haben, damit sie nicht mit dem Hebemechanismus in Berührung kommt und Sie sich Verbrennungen und/oder Verletzungen zuziehen.
			Benutzen Sie Ihren Sessel nicht oder unter dem Einfluss von «Betäubungsmitteln» oder wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre geistigen und körperliche Fähigkeiten beeinträchtigen, Ihren Sessel sicher zu benutzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre medizinische Behandlung Ihre Fähigkeiten beeinträchtigen könnten, den Sessel sicher zu verwenden.
			Wenn Sie Ihren Sessel in die Mitte eines Raums stellen, können Personen, die durch den Raum gehen das Netzkabel berühren, sich beim Sturz verletzen und/oder das Netzteil beschädigen. Sorgen Sie dafür dass, das Verlängerungskabel so verlegt wird das niemand stürzen kann.
			Wenn der Nutzer des Sessels schläft oder bewusstlos ist und die Fernbedienung versehentlich betätigt wird, kann er vom Sessel rutschen
			Wenn Sie Probleme mit Ihrem Sessel haben, nutzen Sie ihn nicht mehr, bevor Sie das Problem analysiert haben. Wenden Sie sich an den Kundendienst des Fachhändlers, bei dem Sie Ihren Sessel gekauft haben.
			Wenn Ihr Körpergewicht die maximale Belastbarkeit Ihres Sessels überschreitet, kann der Sessel instabil werden und umkippen, was zu Verletzungen führen kann. Das maximal zulässige Gewicht finden Sie in den technischen Daten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sessel ist ausschließlich zum Sitzen für eine Person konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Sessel ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie den Sessel nur wie in dieser Originalbetriebsanleitung beschrieben. Jede andere

Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.


Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit reduzierten geistigen und körperlichen Fähigkeiten benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Anwendung: Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Sessel darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Aufstellen Ihres Aufstehsessels

	Um den Transport zu erleichtern und Ihren Sessel während des Transports zu schützen, wird Ihr Sessel in einem stabilen Karton mit der demontierten Rückenlehne geliefert. Der Zusammenbau der Rückenlehne an die Sitzfläche wird einige Minuten in Anspruch nehmen, bitte Sie folgen Sie unserer Aufbauanleitung:
	Verbinden Sie den Transformator mit dem Stromkabel. Legen Sie den Transformator auf den Boden hinter dem Sessel und achten Sie darauf, dass er nicht durch die Stuhlmechanik eingequetscht wird.

Transformator

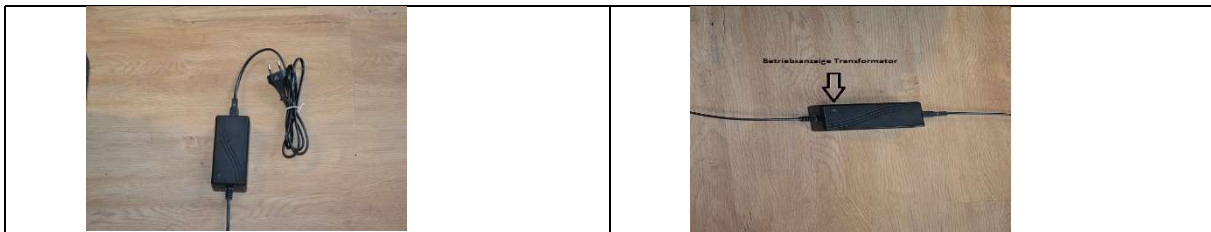

- Dicke Teppiche können die ordnungsgemäße Funktion Ihres Sessels beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Beinstütze nicht auf dem Teppich reibt, während Sie ihn verwenden.
- Um das Rückenteil anzubauen: lesen Sie die folgenden Seiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist. Ein nicht feststehender, gerade ausgerichteter Sessel kann während des Gebrauchs ein Knistern und/oder ruckhafte und unregelmäßige Bewegungen während des Betriebes verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel des Transformators nicht in die Scharniere und/oder die Mechanik des Sessels eingeklemmt ist.







Montage der Rückenlehne

Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen durchzuführen.

- **Schritt 1:** Stellen Sie das Unterteil des Sessels am gewünschten Platz auf, achten Sie darauf das Sie einen Mindestabstand von 60 cm zur Wand einhalten. Stecken Sie dann den Stecker in eine Netzsteckdose.

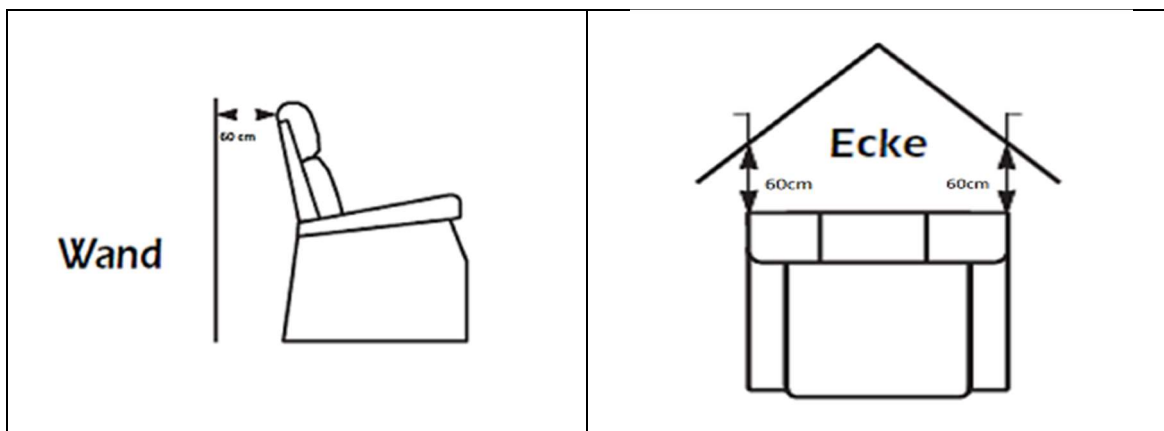

- **Schritt 2:** Überprüfen Sie ob die Befestigungswinkel(A) senkrecht nach oben stehen. Sollte das nicht der Fall sein stellen Sie die Befestigungswinkel mit Hilfe der Fernbedienung in die aufrechte Position.
- **Schritt 3:** Nehmen Sie nun die Rückenlehne und stecken diese mit den Führungshülsen (B) auf die Befestigungswinkel (A) und drücken Sie dann die Rückenlehne fest nach unten bis die Rückenlehne fest sitzt.
- **Schritt 4:** Nehmen Sie nun die beiden mitgelieferten Inbus-Schrauben M8 und drehen diese in die dafür vorgesehen Gewinde (C). Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Ihr Aufstehsessel ist nun betriebsbereit.

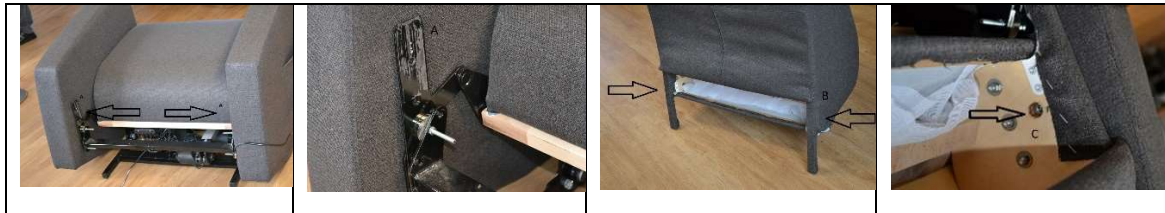



Die „6 Tasten“ Fernbedienung

	Der Aufstehsessel Salamanca ist mit der 6-Tasten Fernbedienung ausgerüstet. Die Fernbedienung beinhaltet 3 Tastenreihen. Die erste Reihe bewegt die Fußstütze hoch und runter, die zweite Reihe bewegt die Rückenlehne vor und zurück, die dritte Reihe beinhaltet die Aufstehfunktion und die Herzwaage-Einstellung. • Taste A Anheben der Beinstütze • Taste B Absenken der Beinstütze • Taste C Kippen des Rückenteils nach hinten • Taste D Kippen des Rückenteils nach vorne • Taste E Ausstehfunktion • Taste F Herzwaageposition •
	Lassen Sie sich nicht in Ihren Sessel fallen, um sich hinzusetzen!

1. Um die Beinstütze anzuheben, drücken Sie die Taste A
2. Um die Beinstütze zu senken, drücken Sie die Taste B
3. Um die Rückenlehne nach hinten zu kippen, drücken Sie die Taste C
4. Um die Rückenlehne nach vorne zu kippen, drücken Sie die Taste D
5. Bevor Sie die Aufstehfunktion (Taste E) nutzen achten Sie darauf das sich die Rückenlehne in der aufrechten Position befindet, drücken Sie dazu die Taste D und anschließend die Taste E, lassen Sie die Taste los, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.
6. Um in die Herzwaageposition zu kommen, setzen Sie sich in Ihren Sessel und drücken Sie die Taste F bis Sie die Endposition erreicht haben, anschließend drücken Sie die Taste A bis die

Beinstütze die gewünschte Position erreicht hat, folgend drücken Sie die Taste C bis die Rückenlehne die gewünschte Position erreicht haben.

7. Verlassen des Sessels, drücken Sie die Taste E und heben Sie den Sessel auf eine Höhe an, bis Sie leicht aufstehen können. Lassen Sie die Taste los.

	Bringen Sie den Sessel, nachdem Sie ihn verlassen haben, in die Sitzposition zurück (waagerechter Sitz), damit kein Kind oder Haustier unter den Stuhl gelangen kann.
---	--



Wartung und Instandhaltung

Ihr Sessel sollte regelmäßig einigen Kontrollen unterzogen werden. In dem Sie unsere Empfehlungen befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Sessel viele Jahre lang problemlos nutzen können. Wenn Sie Fragen zu unseren Empfehlungen haben, rufen Sie uns an. (06854 803081)

- Halten Sie den Sessel trocken und vermeiden Sie Flüssigkeitsspritzer.
- Ihr Sessel ist ausschließlich für den Innenraum bestimmt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die verschiedenen Kabel-Stecker, um sicherzustellen, dass sie fest und unbeschädigt sind. Wenn Sie Schäden feststellen, trennen Sie den Sessel vom Strom und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Um den Sessel zu reinigen verwenden Sie eine leichte Seifenlauge.

Garantien

 Devita Möbel fürs Leben.	EG- Konformitätserklärung	Gültig bis: 30.05.2024														
Hersteller: Devita GmbH Poststr. 11 66649 Oberthal Modellnummer: E 13 Modellname: Salamanca																
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="346 750 783 808">Einschlägige Richtlinien</th> <th data-bbox="783 750 1319 808">Harmonisierte EN - Normen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="346 808 783 898"></td> <td data-bbox="783 808 1319 898">Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 898 783 1048">1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU</td> <td data-bbox="783 898 1319 1048">EN 55014-1:2017+A11 EN 55014-2:2015 EN 62233:2008 EN 60601-1-2:2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 1048 783 1137">2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD) 2014/35/EU</td> <td data-bbox="783 1048 1319 1137">EN 60335-1:2012+A11 +A13 +A1 +A14 +A2 +A15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 1137 783 1288">3. Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS II) 2011/65/EU</td> <td data-bbox="783 1137 1319 1288">2011/65/EU EN IEC 63000:2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 1288 783 1406">4. Maschinenrichtlinie 2006/42/CE</td> <td data-bbox="783 1288 1319 1406">ISO 12100:2010 EN 12520:2015 EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 1406 783 1440">Richtlinie über Medizinprodukte</td> <td data-bbox="783 1406 1319 1440">93/42/EWG</td> </tr> </tbody> </table>			Einschlägige Richtlinien	Harmonisierte EN - Normen		Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen	1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU	EN 55014-1:2017+A11 EN 55014-2:2015 EN 62233:2008 EN 60601-1-2:2015	2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD) 2014/35/EU	EN 60335-1:2012+A11 +A13 +A1 +A14 +A2 +A15	3. Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS II) 2011/65/EU	2011/65/EU EN IEC 63000:2018	4. Maschinenrichtlinie 2006/42/CE	ISO 12100:2010 EN 12520:2015 EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014	Richtlinie über Medizinprodukte	93/42/EWG
Einschlägige Richtlinien	Harmonisierte EN - Normen															
	Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen															
1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU	EN 55014-1:2017+A11 EN 55014-2:2015 EN 62233:2008 EN 60601-1-2:2015															
2. Niederspannungs-Richtlinie (LVD) 2014/35/EU	EN 60335-1:2012+A11 +A13 +A1 +A14 +A2 +A15															
3. Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS II) 2011/65/EU	2011/65/EU EN IEC 63000:2018															
4. Maschinenrichtlinie 2006/42/CE	ISO 12100:2010 EN 12520:2015 EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014															
Richtlinie über Medizinprodukte	93/42/EWG															
Dokumentationsbevollmächtigter: Frank Dewes Poststr. 11 D-66649 Oberthal/Saar Oberthal/Saar, den 07.07.2022  Frank Dewes, Geschäftsführer																

